


ÉLASTIL II[®]

Répartition de pression avec un patient de 60 kg.

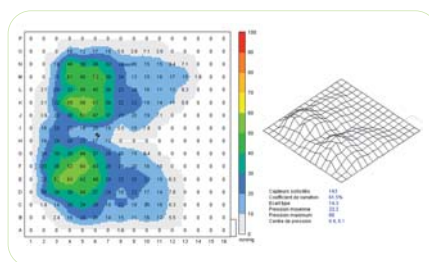

faible à moyen



Pour la référence 351



DESCRIPTION

Le coussin est composé d'une plaque de gel viscoélastique galbée au niveau des ischions et protégée par une enveloppe en jersey faumé.

Principe :

Le coussin Élastil constitue une double peau et augmente artificiellement l'épaisseur du pli cutané. Son gel Elacton à forte réticulation a les mêmes caractéristiques d'élasticité que la peau et reproduit la consistance des tissus adipeux en protégeant les proéminences osseuses.

Ergonomie :

- Le coussin Élastil est facilement maniable par les patients qui effectuent régulièrement des transferts.
- Le gel n'absorbe pas les liquides et permet l'usage du coussin en milieu humide.
- Le gel Elacton ne durcit pas dans le temps, ne coule pas, ne fuit pas, résiste au déchirement et au vieillissement, résiste aux charges élevées sans craindre un écrasement total.
- Le gel Elacton ne se déplace pas sous le poids.
- Le coussin est livré avec 2 protections intégrales avec ouverture sur un côté.

Facilité de mise en place :

Les galbes correspondants aux zones ischiatiques se positionnent à l'arrière.

Nettoyage, désinfection :

- Du coussin : par spray de désinfection de surface conforme aux normes NF.
- De la protection intégrale : lavable en machine à 40 °C et testé avec un grand nombre de détergents et désinfectants marqués NF.

CARACTÉRISTIQUES

Gel viscoélastique Elacton.

Poids minimum et maximum du patient admissible tout en maintenant l'efficacité du support :

- Minimum : 50 kg.
- Maximum : 250 kg.

Protection intégrale Souplex : Jersey sur mousse avec base antiglisse.

Dimensions standard : 40 x 40 x 2,5 à 3 cm.

Nous réalisons également toutes dimensions sur mesure, dans un délai de 48 heures.

Poids du coussin standard : 4,2 kg.

Renouvellement : un coussin tous les 2 ans.

Références Escarius :

- 351. Élastil II.
- 353. Élastil percé.
- 356. Élastil sur mesure.

Code L.P.P. : 1206956

Tarif L.P.P. TTC : 66,63 €

Classe : I

Ordonnance : M. ou M^{me} Dupont présente un score de (X) sur l'échelle de Norton. Ce score correspond à un niveau de risque d'escarre faible à moyen. Son état de santé nécessite la délivrance d'un coussin **Élastil II[®]** de classe I.

Les caractéristiques du gel Elacton[®] permettent de réaliser toutes sortes de cales ou de plaques de toutes les dimensions et épaisseurs correspondant aux besoins des patients. Elacton[®] est conforme aux normes NF EN 597 parties 1 et 2 concernant le comportement au feu. Grâce à sa transparence aux rayons X, il est utilisé aux blocs opératoires ou lors d'examen radiologiques prolongés. Son flux thermique élevé lui permet de maintenir la température de la peau sans provoquer d'échauffement.