

Invacare® | **H171 & H172 Stileo**



Installation immédiate sans perçage !

Les nouvelles barres à ventouses *Invacare Stileo H171 & H172* vous apporteront un maximum de maintien là où vous le souhaitez. Très faciles à installer, les barres **Stileo** sont équipées de 2 larges ventouses à fixer au mur sans aucun perçage et en toute sécurité grâce aux 2 témoins visuels de sécurité vert/rouge permettant de contrôler en permanence la bonne installation. Très faciles à transporter, les barres à ventouses **Stileo** vous accompagneront lors de tous vos déplacements, elles existent en 2 longueurs 45 et 55 cm pour répondre à tous les besoins et toutes les contraintes d'environnement.



Yes, you can.®



Caractéristiques et Options

Conseils de pose

La ventouse nécessite une surface plane, lisse et non poreuse : faïence murale sans décors (carreau de dimension supérieure à 10 cm). Cette surface doit être propre et sèche, la ventouse doit être propre et sans poussière. Poser la barre à l'endroit choisi, rabattre à fond chaque levier pour créer le vide. Vérifier périodiquement grâce aux indicateurs visuels Vert/Rouge la bonne accroche des ventouses. A défaut, répéter l'opération pour créer le vide.

Précautions d'utilisations


Positionner les ventouses :

- Ne pas fixer sur les joints de carrelage
- Ne pas fixer sur du plâtre, du bois, des surfaces tapissées
- Vérifier et repositionner la barre périodiquement pour assurer que le vide soit bien assuré sous chaque ventouse, vérifier que les 2 indicateurs visuels prévus à cet effet soient verts.



Témoin visuel de sécurité Vert/Rouge

Ce témoin vous indique si votre barre est correctement fixée et si le vide est bien assuré sous la ventouse pour un transfert en toute sécurité !

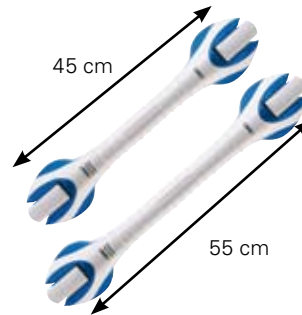

Ventouses de grande précision

Ventouse de diamètre 9 cm.
Barre de diamètre 3,5 cm.
Déport de 7,5 cm par rapport au mur.

Données techniques

H171	45 cm	40 kg	100 kg	80 kg
H172	55 cm	40 kg	100 kg	80 kg

Coloris



Blanc/Bleu

Codes

- 1526476 Stileo H171** - Barres ventouses 45 cm
1526477 Stileo H172 - barres ventouses 55 cm

Garantie : 2 ans

INVACARE® POIRIER® S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 (0) 2 47 62 64 66
Fax : +33 (0) 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2010 Invacare® International Sarl
Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

Stileo - FR - 11/2010 - 1537530



Yes, you can.®